

# Vakuová pumpa pro muže – nevibrační, manuální

## Návod k použití

Vakuová pumpa pánům efektivně pomáhá v boji s většinou erektilních problémů. Díky jemnému tlaku se totiž dostává krev do tkáňových struktur penisu a pánská chloubka tak vydrží v pozoru mnohem déle. Manuální vakuové pumpy využívají **principu opakovaného stisknutí balonku či ramene** a následného vytvoření podtlaku.

### Upozornění:

Vakuová pumpa pro pány je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

### Parametry:

Materiál: ABS plast, akrylát (PMMA), silikon

### Popis výrobku:

Pumpy jsou vyráběny z různých materiálů. Skládají se ze stiskacího balonku nebo stiskací rukojeti, hadičky, válce a manžety.

**Ovládání:** je manuální tzn. po nasazení válce opakovaně stisknete balonek nebo ramena rukojeti, čímž se vytváří podtlak ve válci. Pokud se podtlak stává nepříjemným, uvolníte ho bezpečnostním zpětným ventilem.

### Použití:

1. Pumpu důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, případně použijte **dezinfekční prostředky bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Tuto očistu proveďte i před každým dalším použitím a po použití.

2. Vakuovou pumpu přiložte ideálně na oholená místa, která jsou, stejně jako manžeta, potřena lubrikačním gelem. Potření gelem na kůži protáhněte o cca 3-5 cm, protože pumpa často vsává okolní kůži, což by bez lubrikace mohlo způsobit efekt spálené kůže. Použití můžete jakýkoliv lubrikační gel, doporučujeme lubrikační gely na bázi silikonu, které jsou kluznější a chrání a impregnují latexové manžety.

3. Pumpu přiložte ke kořeni penisu bez erekce, varlata zůstanou vně.

4. Podtlak se vytvoří stlačením balonku, tahem pístu nebo páky (podle typu vakuové pumpy). Můžete využít i spolupráci partnerky/partnera, je však důležité



**VAKUOVÁ  
PUMPA  
SE STISKACÍ  
RUKOJETÍ**

komunikovat a nevytvořit větší podtlak než je příjemné. Podtlak nesmí bolet a penis by neměl měnit výrazné barvu. Také se nesnažte dosáhnout hned napoprvé maximálních hodnot podtlaku.

5. Čím déle bude vakuová pumpa v podtlaku, tím lepší a pevnější erekce nastane. Pro první použití doporučujeme 7-10 minut, poté 15-20 minut. Dobu 15-20 minut doporučujeme také pro trénink topořivých tělísek, kdy je penis opakovaně přiváděn do maximální erekce a po té je tlak uvolňován, případně některé pumpy již mají takto přednastaveny tréninkové programy. Více minut nedoporučujeme.

6. Stiskem zpětného ventilu u hrdla válce napustíte vzduch zpátky do pumpy a dojde k uvolnění. Zpětný ventil, který vrací vzduch zpět do válce, bývá hned u válce a u pump s balónkem mezi balónkem a hadičkou, hned nad balónkem. U pákových vývívů je v místě, kam se připojuje hadička. Pumpu si před použitím důkladně prohlédněte a vyzkoušejte, abyste mohli zareagovat ihned, jakmile nebude podtlak již příjemný. Při vypouštění vzduchu volte pomalé upouštění, nikoliv rychlé!

7. Pro udržení erekce i po sundání pumpy doporučujeme použít erekční kroužek (nejlépe stahovací). Ten je třeba předem navléknout na kořen penisu v povoleném stavu a utáhnout jej v okamžiku sejmutí podtlakového válce. V tom případě si důkladně prostudujte návod i k erekčnímu kroužku.

8. Po použití pumpu omyjte teplou vodou a mýdlem, ideálně použijte **dezinfekci bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Poté pumpu důkladně vysušte a skladujte ji na suchém a tmavém místě, aby nebyla pod vlivem slunečního světla a vysokých či nízkých teplot. Latexovou manžetu udržujte vláčnou silikonovým gelem.

**K pumpám zn. BOOM a BASIC X lze dokoupit různá příslušenství:  
manžety, umělé vaginy nebo náhradní díly.  
Jeden základ + příslušenství, které si dokoupíte = více využití.**

#### Lubrikační gel:

při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Vzhledem k tomu že manžeta je ze silikonu doporučujeme lubrikant na bázi vody nebo **silikonový lubrikant BOOM**, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

#### Doporučení:

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Výrobek nepatří do rukou dětem! Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky. Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout. Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles. Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

